


AGRUPACIÓN DE MUESTRAS

SOLAMENTE PARA VIGILANCIA / NO PARA DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL

1. ABRIR APLICACIÓN DE LA CÁMARA
2. USAR EL CÓDIGO QR
3. PULSAR PARA VER VIDEO

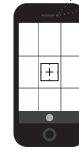

CONSIDERACIONES:

- AGRUPAR LAS MUESTRAS PUEDE IMPACTAR LA SENSIBILIDAD DIAGNÓSTICA.
- CONSULTE CON SU VETERINARIO PARA DETERMINAR SI LAS MUESTRAS AGRUPADAS SON LAS MÁS ADECUADAS Y EL NÚMERO QUE SE DEBE AGRUPAR.

- USAR MATERIALES LIMPIOS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN.
- ETIQUETAR LAS MUESTRAS CON MARCADOR PERMANENTE.
- MANTENER REFRIGERADO DESPUÉS DE LA RECOLECCIÓN.

MUESTRAS APROBADAS PARA AGRUPAR:

- HISOPOS (NASAL, SANGRE, BAZO, ETC.) SANGRE SUERO

VER LOS TIPOS DE MUESTRA DE NIVEL 1 Y NIVEL 2 PARA MATERIALES ESPECÍFICOS E INSTRUCCIONES DE SUJECCIÓN Y RECOLECCIÓN. VER INSTRUCCIONES DE ENVÍO DE MUESTRAS EN LA PÁGINA QUE CORRESPONDE A ENVÍO DE MUESTRAS.

HISOPOS:

NOTA: EL NÚMERO DE MUESTRAS INDIVIDUALES PUEDE VARIAR


PASO 1.

COLOCAR LA CANTIDAD APROPIADA DE MEDIO DE TRANSPORTE EN UN TUBO CON TAPA DE 5 mL.




PASO 2.

TOMAR UNA MUESTRA CON UN HISOPO.

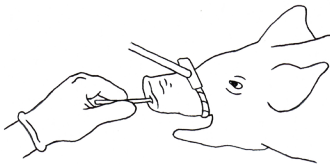


PASO 3.

COLOCAR EL HISOPO DENTRO DEL TUBO CON TAPA. GIRAR VIGOROSAMENTE. REMOVER EL HISOPO MIENTRAS LO APRIETAS CONTRA LA PARED DEL TUBO. DESECHAR EL HISOPO.

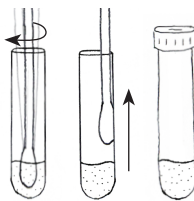


PASO 4.

REPETIR LOS PASOS 2 Y 3 HASTA QUE 5 MUESTRAS DE HISOPOS EN TOTAL SE HAYAN GIRADO EN EL TUBO CON TAPA.

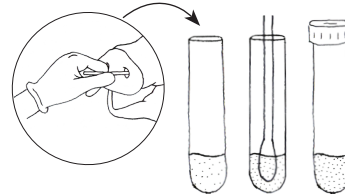

STEP 5.

ETIQUETAR DE MANERA ÚNICA CADA MUESTRA AGRUPADA.

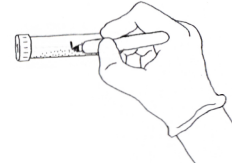


SANGRE:

NOTA: EL NÚMERO DE MUESTRAS INDIVIDUALES PUEDE VARIAR


PASO 1.

TOMAR 2 mL DE SANGRE DE 5 ANIMALES DIFERENTES.

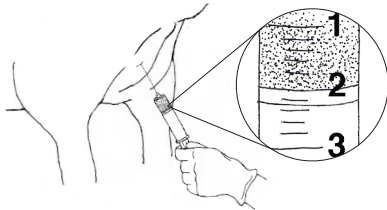


PASO 2.

COMBINAR TODA LA SANGRE EN UN TUBO POR UN TOTAL DE 10 mL.

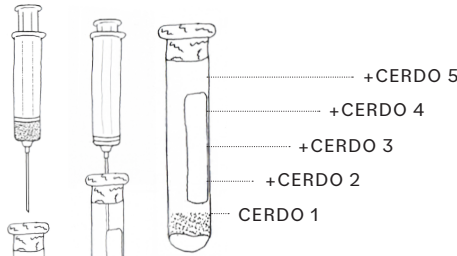

PASO 3.

ETIQUETAR DE MANERA ÚNICA CADA MUESTRA AGRUPADA.

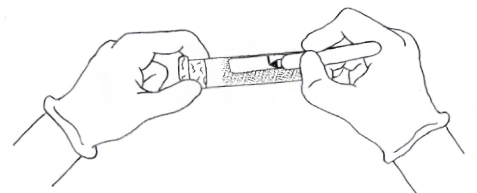


SUERO:

NOTA: EL NÚMERO DE MUESTRAS INDIVIDUALES PUEDE VARIAR


PASO 1.

TOMAR 5 MUESTRAS INDIVIDUALES DE SANGRE.

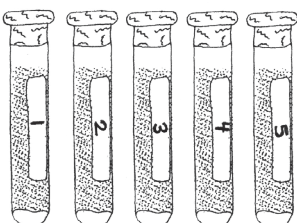


PASO 2.

CENTRIFUGAR LOS TUBOS DE SANGRE A 3100 RPM POR 8 MINUTOS.

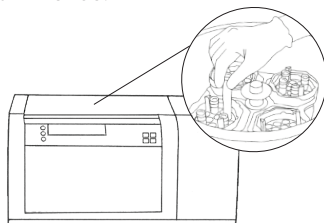


PASO 3.

COMBINAR PARTES IGUALES DE SUERO (PARTE DE ARRIBA) DE LAS MUESTRAS EN UN TUBO CON TAPA.

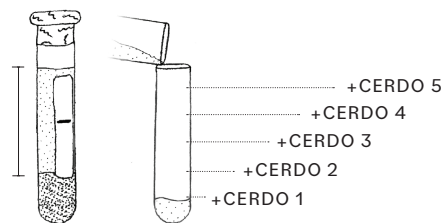

PASO 4.

ETIQUETAR DE MANERA ÚNICA CADA MUESTRA AGRUPADA.

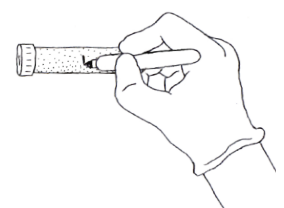

COLABORADORES:

Estos materiales fueron desarrollados a través de un proceso de colaboración entre: Iowa State University, Swine Medicine Education Center; Iowa State University, Center For Food Security and Public Health; American Association of Swine Veterinarians; National Pork Board Multistate Partnership for Security in Agriculture; United States Department of Agriculture.

FINANCIAMIENTO:

Este material fue desarrollado con el financiamiento del National Pork Board.

ILUSTRACIONES:

Mary Breuer
Swine Medicine Education Center
Iowa State University